



# Benutzerhandbuch CM TraumaCover



1. Ziehen Sie den Überzug über den Kopfteil der Traumamatratze. Nach unten über das Fußende ziehen.



2. Ziehen Sie das Klettverschlussband fest um die Matratze.



3. Legen Sie das Kissen dicht am Kopf des Patienten an und fixieren Sie es mit den Klettverschlüssen direkt am Überzug. Haare, die sich in dem Bereich befinden, wo das Kissen befestigt werden soll, nach vorne und unter den Halskragen führen.



4. Fixieren Sie den Kopf des Patienten mit den mitgelieferten Kinn-Stirnriemen. Die Riemen werden an den roten Klettverschlüssen an Kissen und Überzug befestigt.



Bima Plasttechnik AB, Trålvägen 5,43274, Tröslövsläge, Schweden

Verkäufer:



Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143  
Landskrona | Schweden | +46(0)733-109020 |  
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se