

Produktdatenblatt

Aktivin® PowerKill Fläche

IHO

Alkoholisches Flächendesinfektionsmittel

Beschreibung/ Eigenschaften:	<p>Aktivin® PowerKill Fläche ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf der Basis von Ethanol. Das Produkt ist ideal geeignet für alle Bereiche in denen eine gezielte, viruzide Desinfektion alkoholbeständiger Flächen benötigt wird.</p> <p>Durch die innovative SLT-Booster-Technologie von Aktivin® PowerKill Fläche wird auch bei hoher organischer Belastung eine sichere Desinfektionswirkung erzielt.</p> <p>pH-Wert: 4</p>																																								
Zusammensetzung:	<p>In 100g sind enthalten: 60 g Ethanol Enthält nichtionische Tenside < 5%</p>																																								
Anwendungsgebiete:	<p>Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.</p>																																								
Wirkungsspektrum:	<ul style="list-style-type: none"> - bakterizid, levurozid - viruzid inkl. Polio-, Adeno-, Rota- und Noro-Viren 																																								
Anwendung:	<p>Aktivin® PowerKill Fläche kann als Wischdesinfektion (empfohlene Art der Anwendung) oder Spray verwendet werden. Starke Verunreinigungen sind zunächst mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch zu entfernen. Für die Flächenwischdesinfektion eine ausreichende Menge Aktivin® PowerKill Fläche auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen damit abwischen.</p> <p>Eine Sprühdesinfektion mit Aktivin® PowerKill Fläche wird nur für schwer zugängliche Oberflächen empfohlen.</p> <p>Die Flächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzt sein.</p>																																								
Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten	<table border="1" data-bbox="464 1541 1461 1798"> <thead> <tr> <th colspan="3">Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten</th> <th>30 Sek.</th> <th>1 Min.</th> <th>5 Min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Bakterien und Hefen</td> </tr> <tr> <td>Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion bakterizid, levurozid*</td> <td>VAH/ EN 16615</td> <td>mit Mechanik, hohe Belastung</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VAH/ EN 13697</td> <td>ohne Mechanik, hohe Belastung</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid*</td> <td>EN 13697</td> <td>ohne Mechanik, niedrige Belastung</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>tuberkulozid (M. terrae)</td> <td>EN 14348</td> <td>hohe und niedrige Belastung</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 Sek.	1 Min.	5 Min.	Bakterien und Hefen						Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		x			VAH/ EN 13697	ohne Mechanik, hohe Belastung			x	Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid*	EN 13697	ohne Mechanik, niedrige Belastung		x		tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	hohe und niedrige Belastung	x		
Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 Sek.	1 Min.	5 Min.																																				
Bakterien und Hefen																																									
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		x																																					
	VAH/ EN 13697	ohne Mechanik, hohe Belastung			x																																				
Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid*	EN 13697	ohne Mechanik, niedrige Belastung		x																																					
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	hohe und niedrige Belastung	x																																						

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE SW

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten	Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 Sek.	1 Min.	5 Min.
	Viren					
	viruzid*	EN 14476/ EN 16777	inkl. HBV/HIV/HCV		x	
	wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	x		
	wirksam gegen Noroviren	EN 14476	niedrige Belastung		x	
		prEN 16777	niedrige Belastung		x	
	wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung	x		
		prEN 16777	niedrige Belastung		x	
	wirksam gegen Polioviren	EN 14476	niedrige Belastung		x	
	wirksam gegen Vacciniaviren (MVA)	prEN 16777	niedrige Belastung		x	
Ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung		x		
	EN 13697	niedrige Belastung		x		
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe Belastung		x		
	EN 13697	niedrige Belastung		x		
* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)						
Sicherheits- und Gefahrenhinweise:	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offener Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.					
Verpackungsgrößen:	1000 ml, 5 l					
Produktstatus:	Registriert als Biozidprodukt baua Reg.- Nr. N-66149					

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht, die Ware für seinen speziellen Einsatzzweck zu prüfen. Jegliche Haftung für unsere Hinweise ist ausgeschlossen.

Stand: April 2023, V06, Ka

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE SW

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT