

## Gebrauchsinformation TrueClot® Trainingsgaze

Die TrueClot® Trainingsgaze wurde für den Einsatz mit dem TrueClot® Simulationsblut entwickelt, um eine realistisch Blutungsgerinnung zu simulieren. Die Trainingsgaze ist für die Ausbildung und Simulation im Tamponieren von Wunden (Wundpacking) und in der Blutungskontrolle gedacht.

### Gebrauchsanweisung:

Entnehmen Sie die Gaze aus der Verpackung. Tamponieren Sie die Gaze auf eine simulierte Wunde, in die fließendes oder angesammeltes TrueClot® Simulationsblut eingebracht wurde. Es dauert mindestens 60 Sekunden, bis die Gerinnung beginnt. Es werden sich so lange Simulationsgerinnsel bilden, wie die Gaze mit dem TrueClot® Simulationsblut in Kontakt bleibt, oder bis die Gaze gänzlich mit Simulationsblut durchtränkt ist.

**Wasch- und Sicherheitshinweise:** Bei Flecken auf der Haut diese gründlich mit Seife und Wasser abwaschen. Bei kleinen Flecken auf Stoff oder Bekleidung mit Wasser abspülen oder einweichen und wie gewohnt waschen. Bei größeren Flecken oder solchen, die getrocknet sind, spülen Sie die Stelle sorgfältig ab und schrubben Sie sie sanft mit Waschmittel und Wasser ab, um so viele Rückstände wie möglich zu entfernen. Weichen Sie das Kleidungsstück in einer Mischung aus Wasser und Waschmittel 1-3 Stunden lang ein, dann waschen Sie es wie gewohnt. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Oberflächen sofort nach dem Einsatz reinigen. Flecken, die mehrere Stunden eingetrocknet sind, können unter Umständen nicht so einfach entfernt werden. **Nicht alle arten von Stoffen und Materialien wurden getestet.** TrueClot® Simulationsblut kann gewisse Arten von Stoff, Material und Oberflächen verfärben. Luna ist nicht verantwortlich für etwaig auftretende Verfärbungen oder Schäden. TrueClot® Simulationsblutkonzentrat, Simulationsgaze und Gerinnungslösung sind sicher und ungefährlich und können im Restmüll entsorgt werden.

Nehmen Sie das TrueClot® Simulationsblutkonzentrat nicht ein und nehmen Sie es auch nicht in den Mund. Sollte dies doch passieren, spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser. Vermeiden Sie Augenkontakt. Bei Augenkontakt die Augen großzügig mit Wasser spülen. Bei andauernder Reizung einen Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen unter [trueclot.com](http://trueclot.com)