



Produktdatenblatt

Weroplast® BlueMamba

Pflasterformen:	Rollenware (3 cm x 5,5 m (gedehnt)) einsetzbar als: Wundschnellverband, Fingerpflaster, Fingerkuppenpflaster, Fingergelenkpflaster
Eigenschaften:	 Haftet dank seiner besonderen Struktur nur an sich selbst – aber nicht an Haut, Haaren oder Wunde Selbsthaftend (kohäsiv) Elastisches rutschfestes Material Reißbar Farbe blau: zur visuellen Erkennbarkeit Auch für den Lebensmittelbereich geeignet Hautfreundlich Wasser- und ölabweisend Latex- und klebstofffrei Schmerlos zu entfernen
Anwendungsbereich:	 Alle Arbeitsbereiche, bei kleineren Schürf- und Schnittwunden Leichter bis mittelstarker Verschmutzungsgrad
Anwendung:	 Verpackung öffnen und Pflasterrolle entnehmen. Je nach Stärke der Blutung den Anfang des selbsthaftenden Pflasters mehrfach falten um ein Wundkissen zu bilden. Das gefaltete Wundkissen auf die Wunde legen und 1 - 2 x umwickeln. Pflaster abreißen oder abschneiden und loses Ende andrücken. Fingerkuppenverletzung: Am Gelenk einmal umwickeln und spiralförmig zur Fingerkuppe weiterführen. Mehrmals um die Kuppe wickeln. Bei stärkerer Blutung ein Wundkissen bilden. Spiral förmig wieder zum Ausgangspunkt wickeln. Pflaster abreißen oder abschneiden und loses Ende Hinweis: Das elastische Pflaster nicht zu fest anlegen, da dies zu einer Blutstauung führen kann.
Materialien:	Vliesstoff, Elasthan, synthetischer Kautschuk
Lagerung:	Trocken aufbewahren. Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Banken

Wiesbadener Volksbank IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06 BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00 BIC DEUT DE FF 510 Kontakt

WERO GmbH & Co. KG Idsteiner Straße 94 D-65232 Taunusstein Phone +49 (0) 6128 / 97570 Fax +49 (0) 6128 / 975750 info@wero.de · www.wero.de Zertifiziert

DIN EN ISO 9001 ÖKOPROFIT

Best in Work.Life.Safety.



Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse I
Hersteller:	Kingstar Medical (Xianning) Co., Ltd.No. 79 Yong'andong Road Xian'an District 437100 Xianning City, Hubei Province, People's Republic of China
EC-Rep:	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, Germany
Importeur:	WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Str. 94, D-65232 Taunusstein

Stand: Juni 2023, V04, Fü