

Blizzard

Überlebensschlafsack


BPS-11



Gebrauchsanweisung



- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Schlafsack heraus. Dehnen Sie den Überlebensschlafsack durch behutsames seitliches Strecken.

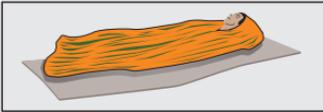

- Wenn möglich, legen Sie den Schlafsack für eine bessere Isolierung auf eine Unterlage (z. B. Rucksack, Isomatte, Vegetation).



- Ziehen Sie den Schlafsack über den Kopf, ohne Nase und Mund zu bedecken.

Inhalt:

1 x Blizzard Überlebensschlafsack.

Anwendungsgebiet:

Zur Prävention & Behandlung von Hypothermie.

Anwenderprofil:

Blizzard-Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal und Laien geeignet.

Patientenprofil:

Blizzard-Produkte sind für die Anwendung bei Patienten mit Hypothermie-Risiko oder zur Behandlung von Hypothermie angezeigt.

Klinische Vorteile:

Verringert den Wärmeverlust des Patienten an die Umgebung, um weitere Schäden zu verhindern.

Leistungsmerkmale:

Bietet eine wind- und wasserdichte Barriere gegen die Umwelt und sorgt gleichzeitig für einen verbesserten Wärmewiderstand.

Produktsprüche:

Wärmewiderstand von ca. 7 TOG.

Gegenanzeigen:

Suchen Sie Schutz und verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen wie Felsüberhängen oder in der Nähe von Bäumen während eines Gewitters. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. Bei Verwendung nach Ablauf des Verfallsdatums besteht die Gefahr von Funktionseinbußen.

Restrisiken/Warnungen:

Ersttückungsgefahr, Gesicht nicht bedecken. Stellen Sie sicher, dass der Patient in regelmäßigen Abständen überwacht wird. Suchen Sie bei einer Hypothermie immer einen Arzt auf.

Meldungen:

Kontaktieren Sie bei schwerwiegenden Vorfällen den Hersteller (info@ps-med.com).



Hergestellt und vertrieben von
Blizzard Protection Systems Limited
 Unit 2 Coed y Parc Industrial Estate,
 Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YU,
 Vereinigtes Königreich
 +44 (0)1248 600666 |
 info@ps-med.com |

www.blizzardsurvival.com

Gewicht: 385g (13.5oz)

Bevollmächtigter Vertreter in der EU,

Importeur:

Comply Express Lda, StartUp Madeira,
 EV 141
 Campus da Penteada, 9020 105
 Funchal, Portugal.



Bevollmächtigter
Vertreter in der EG

Farbe Ref. # SN#
 Orange BPS-11 8465-99-958-4315



Produktidentifizierungsnummer (UDI)



Medizinprodukt

Nicht steril

Nicht wiederverwenden

Enthält oder weist
Naturkautschuk/Matex
auf

Brennbar

MR-unsicher

PART OF SAFEGUARD MEDICAL

Reflexcell™
 3-layer

Rev.2