

Produktinformation

Detektierbare Pflaster WERO

Eigenschaften:	Weroplast® AquaFlex Detect elektromagnetisch detektierbar Weroplast® PowerDetect elektromagnetisch detektierbar Weroplast® X-Ray Detect röntgen- und elektromagnetisch detektierbar
	Werosmart® AquaFlex Detect elektromagnetisch detektierbar Werosmart® PowerDetect elektromagnetisch detektierbar
Produktbeschreibung:	Pflaster und Wundschnellverbände mit einer detektierbaren Wundauflage Wundauflage: Faservlies mit einer rückseitig fixierten Aluminiumfolie. Weroplast® X-Ray Detect hat zusätzlich Fäden, die mit einer durch Röntgengeräte erkennbaren Substanz ausgerüstet sind.
Anwendungsbereich:	Nahrungs- und Genussmittelindustrie, besonders im automatisierten und mechanisierten Bereich.
Produktvarianten:	Wundschnellverbände, Pflasterstrips, Fingerpflaster, Fingerkuppenpflaster, Fingergelenkpflaster.
Detektierbarkeit:	Der Nachweis des Pflasters erfolgt durch eine Aluminiumfolie auf der Rückseite der Wundauflage (Fixierung zwischen Vlies und Trägerfolie). Nachweis durch konventionelle Metalldetektoren: Unsere Artikel werden durch Ablenkung der Feldlinien in einem elektromagnetischen Feld detektiert. Der Nachweis durch Röntgendetektoren ist nur bei Weroplast® X-Ray Detect möglich. Bei der Einstellung der Detektiergeräte handelt es sich um eine sehr komplexe Thematik. Einige wichtige Einflussfaktoren auf Detektierbarkeit sind: <ul style="list-style-type: none"> - Art, Abmessungen und Stärke der Metallschicht - Ausrichtung, Geschwindigkeit und Lage der Metallschicht beim Passieren des Detektors - Art, Einstellung und Empfindlichkeit des Detektors (z.B. Größe der Suchspulen-Durchlassöffnung) - Produkteigenschaften (z.B. Leitfähigkeit, Konsistenz, Feuchte) und Produktsignale (z.B. Wasser und Salz im Produkt beeinflussen den Nachweis) - Umwelteinflüsse (z.B. Metallteile in der Umgebung)

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 3301

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT



Prüfergebnisse zur Detektierbarkeit

Prüfer: extern: Pulsotronik – Anlagentechnik GmbH

Die oben genannten detektierbaren Pflaster werden sicher erkannt.

Visuelle Inspektion:

Für die Trägermaterialien werden zusätzlich Farben ausgewählt, die normalerweise nicht in Lebensmitteln vorkommen (z.B. blau). Das Pflaster selbst fällt durch diese Färbung im Produktionsprozess auf und kann entfernt werden.

Hersteller:

HOMANN-MEDICAL GmbH & Co. KG, Am Weserufer 39, D-31592 Stolzenau

Vertrieb durch:

WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Str. 94, D-65232 Taunusstein

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 33 10

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT