

Weroplast® SprayOn Sprühpflaster

Anwendung: Vor der Anwendung Wunde reinigen und trocknen. Im Bedarfsfall mehrfach aus ca. 5 - 10 cm Entfernung aufsprühen. Besonders geeignet zur Anwendung an schwierigen Körperstellen wie Ellbogen oder Knie.

Sicherheitshinweise: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf infizierten oder tiefen Wunden anwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Inhaltsstoffe: Butane, Ethyl Acetate, Acetone, Propane, Acrylates Copolymer, Isobutane, Ricinus Communis Seed Oil



Gefahr

50 ml

e

75



4

052677 059283

LOT / siehe Boden

REF 3 11 02

Vertrieb durch: WERO GmbH & Co. KG · D-65232 Tausnusstein · www.wero.de

Aerochemica Dr. Deppe GmbH, Am Selder 35a, 47906 Kempen

WERO

Weroplast® SprayOn

Sprühpflaster

- Bildet transparenten Schutzfilm
- Wasserfest
- Schnelltrocknend

SCHÜTZT
SCHÜRF- UND
SCHNITT-
WUNDEN

