

Blizzard Traumadecke


BPS-01




Gebrauchsanweisung



- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Decke heraus. Dehnen Sie die Decke durch behutsames seitliches Strecken.

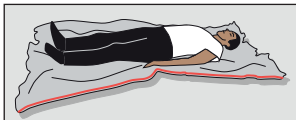

- Legen Sie den Patienten in die Mitte der Decke, mit der metallischen Seite zum Patienten hin.

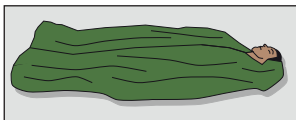

- Wickeln Sie die Decke um den Patienten und verwenden Sie den selbstklebenden Streifen, um die Decke zu schließen. Vergewissern Sie sich, dass alle Öffnungen versiegelt sind. Der Klebestreifen kann wieder geöffnet werden, um einen kontinuierlichen Zugang für die klinische Versorgung zu ermöglichen. Wiederholen Sie ggf. Schritt 1.

Inhalt

1x Blizzard Traumadecke.

Anwendungsgebiet:

Zur Prävention & Behandlung von Hypothermie.

Anwenderprofil:

Blizzard-Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal und Laien geeignet.

Patientenprofil:

Blizzard-Produkte sind für die Anwendung bei Patienten mit Hypothermie-Risiko oder zur Behandlung von Hypothermie angezeigt.

Klinische Vorteile:

Verringert den Wärmeverlust des Patienten an die Umgebung, um weitere Schäden zu verhindern.

Leistungsmerkmale:

Bietet eine wind- und wasserdichte Barriere gegen die Umwelt und sorgt gleichzeitig für einen verbesserten Wärmewiderstand.

Produktansprüche

Wärmewiderstand von ca. 7 TOG.

Gegenanzeigen:

Suchen Sie Schutz und verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen wie Felsüberhängen oder in der Nähe von Bäumen während eines Gewitters. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. Bei Verwendung nach Ablauf des Verfallsdatums besteht die Gefahr von Funktionseinbußen.

Restrisiken/Warnungen:

Erstickungsgefahr, Gesicht nicht bedecken. Stellen Sie sicher, dass der Patient in regelmäßigen Abständen überwacht wird. Suchen Sie bei einer Hypothermie immer einen Arzt auf.

Meldungen:

Kontaktieren Sie bei schwerwiegenden Vorfällen den Hersteller (info@ps-med.com).



Hergestellt und vertrieben von
Blizzard Protection Systems Limited
Unit 2 Coed y Parc Industrial Estate
Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YY,
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1248 600666 |
info@ps-med.com |
www.blizzardsurvival.com

Gewicht: 430g (15oz)

Bevollmächtigter Vertreter in der EU, Importeur:

Comply Express Lda, StartUp Madeira,
EV 141 Campus da Penteada, 9020 105
Funchal, Portugal



Bevollmächtigter
Vertreter in der EG

Farbe	Ref. #	NSN #
Grün	BPS-01	6532-01-524-6932



5060297210006
Produktidentifikationsnummer (UDI)



Medizinprodukt

Nicht steril

Nicht wiederverwenden

Enthält oder weist Naturkautschukklassen auf

Brennbar

Nicht sicher für MRT

PART OF SAFEGUARD MEDICAL

Reflexcell™
3-layer

Rev.2