

Best in Work.Life.Safety.

WERO

Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) für ZOLL® Geräte

nach §11 MPBetreibV


Vorbereitet, wenn es darauf ankommt!

Der Herztod ist die häufigste Todesursache außerhalb von Krankenhäusern in Deutschland. Die Zeit, die vergeht, bis eine Wiederbelebung und eine Defibrillation stattfindet ist entscheidend. Mit der Bereitstellung eines AED tragen Sie dazu bei, die Überlebenschancen von Betroffenen zu erhöhen.

Im Notfall ist die Funktionstüchtigkeit des AED entscheidend und eine regelmäßige Kontrolle nicht nur sinnvoll, sondern auch Pflicht. Bei einem AED handelt es sich um ein Medizinprodukt, das der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) unterliegt. Somit ist der Betreiber des Gerätes verpflichtet einen Geräteverantwortlichen zu bestimmen, ein Medizinproduktebuch anzulegen und durch regelmäßige Kontrollen (STK) für eine sichere Nutzung zu sorgen.

Als Betreiber eines AED tragen Sie die Verantwortung – WERO steht Ihnen dabei als kompetenter Partner zur Seite.

Die Prüfplakette – was steckt hinter der STK?

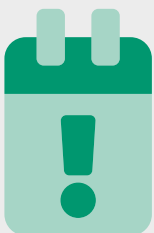

Ähnlich zur TÜV Prüfung Ihres Autos handelt es sich bei der STK für Ihren AED um eine periodische Sicherheitsüberprüfung und findet alle zwei Jahre statt.



Die STK ist für AEDs laut §11 MPBetreibV Pflicht. Entfallen kann die STK für selbsttestende und zur Nutzung durch den Laien bestimmte Geräte, die im öffentlichen Raum platziert sind und einer regelmäßigen Sichtprüfung unterliegen.

Eine allgemeine
Befreiung von der STK
ist nach
§11 MPBetreibV
nicht mehr möglich.

WAS WIRD GEPRÜFT?

- Kontrolle auf äußerliche Beschädigungen
- Prüfung der Verfalldaten von Elektroden und Batterien
- Messung der Energieabgabe (Kinder/Erwachsene)
- Messung der Ladezeiten
- Messung der Sicherheitsentladung
- Prüfung der Analysefunktion
- Erstellung des Messprotokolls zur Anlage im Medizinproduktebuch

WIE LÄUFT DIE STK AB?

1




Online Formular ausfüllen
Optional: Buchung einer
STK vor Ort

2



Kartonage und Rücksende-
etikett per Post erhalten,
AED sorgfältig inkl. Elektrode
und Batterie einpacken

3

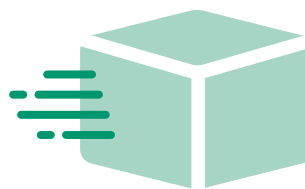

Abholung beauftragen
oder im nächsten
Paketshop aufgeben

4



AED geprüft
und gewartet
zurück erhalten

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Keine STK mehr verpassen – Rundumservice für Ihren AED
- ✓ Ab 1 Gerät ist eine Vor-Ort-Prüfung möglich
- ✓ Autorisierter ZOLL® Händler
- ✓ Erfüllt die in § 7 Absatz 3 und § 11 geforderten Anforderungen der MPBetreibV
- ✓ Inklusive Prüfung der Real CPR Help® Funktion (CPR Feedback) bei ZOLL® Geräten
- ✓ Konformität mit den aktuellen ERC Richtlinien

Weitere Details über Ablauf und
Bedingungen unter stk.wero.de



Ihre WERO Fach- und Medizinprodukteberater:in