

Produktdatenblatt

Dr. Marx Replantatbeutel

Anwendungsbereich:	Sicherer Aufbewahrung und Transport von Amputaten
Produktbeschreibung:	<p>Replantatbeutel sind vor Keimen schützende und kühlbare „Verpackungen“ (Doppelwandbeutel) für die Erstrettung und den Transport von Unfallamputaten. Die doppelwandigen Beutel aus modifiziertem Polyäthylen können mit in Säumen eingefügten farbigen Fäden aus Polyester schnell und sicher verschlossen werden.</p> <p>Bei der Anwendung werden zwei ineinander befindliche Beutel aus Kunststoff von unterschiedlichen Längen verwendet um sicher zu stellen, dass das trocken zu haltende und vor Keimen zu schützende Amputat im inneren Beutel sicher getrennt wird von der Kühlkammer im äußeren Beutel.</p> <p>Der innere Beutel dient der Aufnahme des (unbehandelten) Amputats, dessen Wundfläche mit sterilen Kompressen trocken abgedeckt wird. In diesen inneren Beutel wird keinerlei Flüssigkeit eingefüllt – das Amputat muss trocken aufbewahrt werden. Nach dem Einlegen des Amputats wird dieser innere Beutel mit den roten Schnüren fest verschlossen. Durch das Schließen des inneren Beutels wird der Innenraum des äußeren Beutels noch leichter zugänglich. Dort wird so viel Eis und Wasser zu gleichen Teilen eingefüllt, bis das (durch die Wand des inneren Beutels trocken gehaltene) Amputat von allen Seiten mit Kühlflüssigkeit umgeben ist. Danach wird auch dieser Beutel mit den grünen Schnüren dicht und fest verschlossen.</p> <p>Replantatbeutel werden bei der Herstellung in sehr widerstandsfähige Hüllen aus Kombinationsfolie eingesiegelt und mit Gamma-Strahlen sterilisiert.</p> <p>Replantatbeutel sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.</p>
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Sicheres Doppelwandsystem • Innenbeutel dient der trockenen, keimfreien Aufnahme des Amputats • Amputat kommt nicht mit Kühlflüssigkeit in Verbindung • Geschmeidige und durchstoßfeste Folie (wichtig bei Knochensplittern) • steril

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 33 01

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT

Gebrauchsanweisung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abgetrenntes Körperteil in steriles Verbandmaterial hüllen. 2. Verpackung öffnen. Doppelwandbeutel entnehmen und entfalten. Innen- und Außenbeutel sind am Boden fest miteinander verbunden. 3. Abgetrenntes Körperteil in den Innenbeutel legen und diesen durch Zuziehen der beiden roten Fäden gut verschließen. 4. Außenbeutel bis oberhalb des Amputats zu gleichen Teilen mit Eis und Wasser oder Dr. Marx Künstliches Eis füllen und durch Zuziehen der beiden grünen Fäden sicher verschließen. Alternativ können auch Sofort-Kältekompressen zur Kühlung verwendet werden. 5. Den Doppelwandbeutel an den Fäden (Innen- und Außenbeutel) aufhängen. Stark gefüllte, schwere Beutel zusätzlich unten und seitlich aufliegen lassen. 6. Bei längeren Transportwegen muss frisches Eis, Dr. Marx Künstliches Eis oder Sofort-Kältekompressen nachgefüllt werden.
Ausführungen:	REF 220553 Replantatbeutel S (Hand) REF 220554 Replantatbeutel M (Arm) REF 220555 Replantatbeutel L (Bein)
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse IIa nach Anhang IX Richtlinie 93/42/EWG
Haltbarkeit:	5 Jahre. Bitte beachten Sie das aufgebrachte Verfallsdatum.
Hersteller:	WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Str. 94, D-65232 Taunusstein

Stand: Februar 2023, V02, FÜ

Banken

Wiesbadener Volksbank
 IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
 BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
 IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
 BIC DEUT DE 33 01

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
 Idsteiner Straße 94
 D-65232 Taunusstein
 Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
 Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
 info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
 ÖKOPROFIT